

- Vozík Mlok je určen především pro jízdu po nepevném povrchu (štěr, písek, kameny, bahno apod.), pro pohyb v lehkém terénu a může být využit pro jízdu do vody nebo i pohyb ve vodě (sladké i slané - mořské). Je tak pro uživatele vhodnou pomůckou pro vstup do vodní plochy a zpět. Může být také využit např. jako rekreační lehátko apod.
- Vozík Mlok je nejlépe ovladatelný při jízdě na zadních kolech. Konstrukce je uzpůsobena tak, že k naklopení vozíku na zadní kola není zapotřebí velké síly. Uchopte rukama zadovou opěrku v místech, kde není textilní výplň a vozík naklopte směrem k sobě. Docílíte tak přesunutí těžiště vzad a nadzvednutí předních kol. Takto můžete bez problémů s vozíkem pohybovat a zdolávat např. i hlubší písek. V případě „zapadnutí“ vozíku v terénu doporučujeme otočit vozík na zadních kolech a pokračovat v pohybu táhnutím „pozadu“.
- Po použití je zapotřebí z vozíku vyjmout kola a opláchnout čistou vodou osy a otvory kol od písku, všech nečistot, popř. slané vody a nechat je oschnout. Textilní potah opláchněte vodou popř. k údržbě použijte běžné, neagresivní čisticí prostředky. Ke skladování částí vozíku použijte tašek dodaných s vozíkem.
- Takto používaný a ošetřovaný vozík vám bude bez problémů dlouho sloužit.

Pozor!

- **Vozík Mlok není v žádném případě plavidlem, ani pomůckou určenou pro plavání a nelze ho ve vodě považovat za záchrannou pomůcku! Vozík Mlok není určen ke zdolávání těžkého terénu. Vozík Mlok je určen pro jednu osobu.**
- **Používání vozíku Mlok a s tím spojené aktivity jsou závislé na odpovědnosti uživatele, popř. jeho doprovodu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné úrazy spojené s užíváním vozíku Mlok. Při používání vozíku dodržujte základní pravidla bezpečného pohybu osob na vozíku a nevjíždějte s vozíkem do neznámého nebo nebezpečného terénu (např. příkrý sklon, těžký terén, neznámá vodní plocha).**

Přejeme Vám příjemné chvíle i zábavu strávené s vozíkem Mlok!

Výrobce si vzhledem k vývoji vyhrazuje právo na změnu konstrukčních parametrů bez předchozího upozornění.

© 2012 KURY spol. s r.o.



Návod

k užívání mechanického vozíku MLOK



Výrobce: KURY spol. s r.o.
Zdechovice 28, 533 11, Czech Republic
tel.: +420 466 936 139, fax: +420 466 936 138
e-mail: kury@kury.cz, www.kury.cz

KURY

VOZÍK MLOK - základní součásti

- Vozík je dodáván v rozloženém stavu ve dvou přepravních taškách.
- Čistá váha vozíku MLOK je 17,15 kg.






• Velká taška (A) obsahuje:

- složený rám vozíku MLOK (3 části):
 - lýtková opěrka (1)
 - sedačka (2)
 - zádová opěrka (3)
- váha velké tašky s rámem je 9,96 kg
- rozměry tašky jsou 86 x 58 x 37 cm

• Malá taška (B) obsahuje:

- 2 ks dvojkola průměr 40 cm (4)
- 2 ks vidlice s předním kolem, kloboučkem a závlačkou (5)
- 2 ks osy zadních dvojkol se závlačkou (6)
- váha tašky s koly je 8,8 kg
- rozměry tašky jsou 62 x 40 x 25 cm

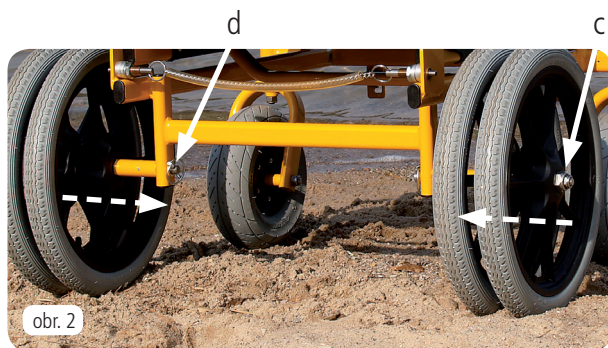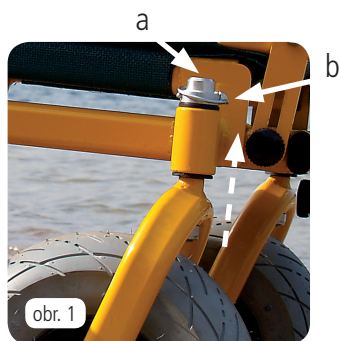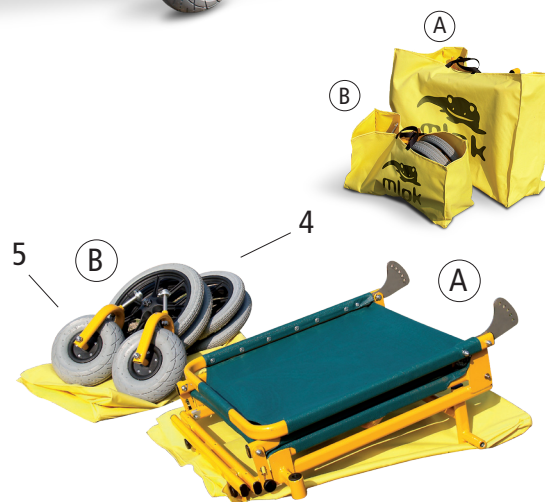

Skládání vozíku a příprava k použití

1. vyjměte **složený rám vozíku (C)** z velké tašky
2. vyjměte **kola s příslušenstvím (D)** z malé tašky
3. **upevněte přední kola (obr. 1):**
 - do svislých pouzder vpředu zespuďte osy vidlic s kolem (viz šipka)
 - nahoře navlékněte **klobouček (a)** a prostrčte osu **závlačky (b)** otvorem v kloboučku a svislé osy vidlice
 - závlačky pečlivě sklopte, aby bylo zajištěno pevné uchycení kol do vozíku
4. **upevněte zadní kola (obr. 2):**
 - zadními dvojkoly prostrčte **dlouhou osu (c)** a dvojkolo s touto osou prostrčte pouzdem vzadu vespod na rámu a zajistěte **závlačkou (d)**
 - prostrčte čep závlačky z vnitřku vozíku pouzdem a osou
 - závlačky vždy pečlivě sklopte, aby bylo zajištěno pevné uchycení kol do vozíku
5. po upevnění všech kol, **rozložte rám vozíku (obr. 3):**
 - lýtkovou opěrku sklopením opřete o nosník vpředu
 - plastový šroub našroubujte do středního otvoru (**obr. 4A**); při skládání vozíku lýtkovou opěru sklopte a zajistěte šroubem do spodního otvoru (**obr. 4B**)
 - zádovou opěrku nastavte **pomocí řemínku (obr. 5)** vespod zádové opěrky tak, aby **čepy (obr. 6)** zapadly do otvorů v segmentu zádové opěrky; zatlačením (nebo zatáhnutím) na řemínek rukou nebo nohou uvolněte čepy a nastavte potřebný sklon zádové opěrky; opětovným uvolněním řemínku zafixujte požadovanou polohu opěrky

